

Bezdrôtový enuretický alarm DRI Sleeper® Eclipse

Návod na použitie:

1. Oddel'te Urosensor™ od alarmovej jednotky.
2. Zapnite vypínač na boku alarmovej jednotky. Ak počujete 5 rýchlych pípnutí, alarm správne funguje. Nechajte 20 sekúnd alarm zapnutý bez ďalšieho skúšania, aby sa elektronický systém stabilizoval.
3. Pripevnite Urosensor™ na spodné nohavičky - do vnútra minivložky, alebo medzi dvojitú zosilnenú čas nohaviček. Je dobré, aby Urosensor™ nenalieval priamo na pokožku, môže sa aktivovať aj potom. Tmavá (čierna) strana urosenzora smeruje nahor – k pokožke. Alarm je pripravený začať pracovať.

Dôležité:

1. Pokiaľ je alarm zapnutý, nedotýkajte sa Urosenzora™ rukou, ani iným vlhkým predmetom, pretože ho aktivujete.
2. Ak sa Urosensor™ dostane do styku s močom, je potrebné dôkladne ho umyť, hlavne medzi dvomi čiernymi vodiacimi pásmi.
3. Ak alarm nezačne alarmovať napriek tomu, že sa dostane do styku s močom, zopakujte horeuvedený postup ešte raz. Ak ani tak alarm nefunguje, kontaktujte vášho predajcu.



Ak sa dieťa pomočí, alarm začne zvoniť. Je potrebné vypnúť alarmovú jednotku, Urosensor™ opláchnuť, vysušiť, opäť vsunúť do nohavičiek a zapnúť alarmovú jednotku. Dieťa sa prezlečie do suchého prádla s vloženým Urosensorom™.

Ako funguje liečba alarmom?

- **Liečbu enuretickým alarmom odporúča lekár, na podklade vyšetrenia dieťaťa.**
- Senzor vložený do nohavičiek po kontakte s močom začne alarmovať.
- Dieťa sa zobudí, musí vypnúť alarm a prezliecť sa.
- Počas niekoľkých týždňov (niekedy mesiacov) sa budí na alarm skôr a skôr, až sa zobudí pred tým, ako sa pomočí.
- Dieťa sa budí trvale vždy, keď potrebuje cikať.
- Záverečná fáza - dieťa spí počas celej noci bez toho, aby potrebovalo ísť na záchod.

Distribútor pre ČR a SR: Anatis.s.r.o.
Tel: +421 (0)949 612 767; +421 (0)2 2070 0761
e-mail: anatis@anatis.sk <http://www.anatis.sk>

